



Chemical and Pharmaceutical
OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

ENZIMI PER STRUMENTI CHIRURGICI

DT 048

DT 048 **BAGNO ENZIMATICO**

Enzimi per strumenti chirurgici

PREPARATO LIQUIDO PER L'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI TISSUTALI BIOLOGICI



Agisce anche nei punti **difficilmente raggiungibili** degli strumenti, dove si accumulano i **coaguli sanguigni** e le proteine presenti negli **essudati e nei liquidi organici**.

Contiene enzimi della famiglia delle **proteasi** ed un tensioattivo anionico che gli conferisce un buon potere detergente e garantisce la completa eliminazione del coagulo.

Gli enzimi aggrediscono e decompongono i residui permettendone una **facile eliminazione col risciacquo**.

Consente di **sgrassare e pulire a fondo** gli strumenti facilitando la successiva fase di sterilizzazione.

Indicato per l'**utilizzo ad immersione** anche in vaschette ad ultrasuoni.

Impiegato in studi dentistici, medici, veterinari, ospedali, estetisti, case di cura ecc.

MODALITA' D'USO: Sciogliere il prodotto in acqua in dosi da un minimo di 100 grammi per litro ad un massimo di 500 grammi per litro. Ove possibile portare la soluzione preparata a 40°C in un bagno termostato. Immergere nel bagno gli strumenti da trattare e lasciarli in ammollo per 10-15 minuti. Sciacquare con acqua tiepida.

AVVERTENZE: Rinnovare la soluzione una volta esaurita. Non termostatare mai a temperature superiori ai 60°C.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)

Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale