

# POLVERE IGIENIZZANTE A FREDDO

DT 155

DT 155 **PERACE PIU'**

Polvere igienizzante a freddo

## IGIENIZZA A FREDDO CON AZIONE RAPIDA



Prodotto in polvere facilmente idrosolubile fino a formare una soluzione **biocida di alta efficacia**, concepita per sterilizzare a freddo tutti i Dispositivi Medico-Chirurgici e le superfici.

La dissoluzione in acqua **attiva la reazione** tra il percarbonato e il TAED da cui si sviluppa acido peracetico e ioni peracetici.

Il suo **potere igienizzante** sfrutta un'azione comune a tutti gli ossidanti, ma di gran lunga più efficace perchè gli

**ioni peracetico**, rompono i componenti proteici, enzimatici e metabolici che caratterizzano la parete cellulare dei microrganismi, offrendo così una garanzia di igienizzazione totale.

Il prodotto è sicuro, **senza aldeidi, cloro o sostanze nocive**, non sviluppa fumi tossici e non contiene sostanze allergizzanti. Non danneggia gli strumenti. Completamente biodegradabile.

Indicato per cliniche odontoiatriche, case di cura, ospedali, cliniche veterinarie ecc.

**MODALITA' D'USO:** Sciogliere 16 g di prodotto per ogni litro di acqua, tiepida ed attendere 15 minuti perchè si raggiunga lo sviluppo completo di igienizzante. Distribuire sulle superfici o immergere gli strumenti e lasciare a contatto per almeno 10 minuti. Quindi sciacquare bene. La soluzione può essere utilizzata fino a 24 ore dalla preparazione.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)  
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001**



*Prodotto ad uso professionale*